



**ENAMEL PLUS
HRi FLOW^{HF}**

PROVVISORI IN 5 MINUTI!

Temp Silic Mock up è un prezioso strumento di comunicazione tra dentista, paziente e laboratorio odontotecnico che permette di realizzare provvisori (Mock up) utilizzando il composito fluido altamente riempito Enamel plus HRi Flow, materiale estetico dalle caratteristiche fisiche ideali.

VANTAGGI TECNOLOGICI & OPERATIVI

- impronta con silicone e tray trasparenti 45 sec.
- indurimento impronta 1 min. 30 sec.
- preparazione faccette
- applicazione Flow HRi in mascherina 30 sec.
- fotopolimerizzazione 60 sec.
- polimerizzazione finale con Ena Bond Seal 60 sec.

ENAMEL PLUS HRi FLOW^{HF}

- Altamente riempito
- Altamente fluorescente
- Maggiore viscosità
- Maggiore elasticità
- Maggiore radiopacità
- Migliori proprietà fisiche
- Senza bolle



Caso iniziale



Risultato finale



CARATTERISTICHE FISICHE

	RIEMPITIVO %	DUREZZA VICKERS MPa	YOUNG MODULUS MPa	RESISTENZA FLESSIONE MPa	RESISTENZA COMPRESSIONE MPa	RADIOPACITÀ
HRi Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al



Preparazione sui provvisori



Preparazioni



Ceratura su modello



Silicone e tray* trasparente




Impronta in silicone della ceratura
(indurimento 1 min. 30 sec.)




Dopo rimozione della cera,
applicazione di Flow HRi* in silicone
e polimerizzazione su modello (60 sec.)



Adesivo fotopolimerizzabile in faccette
provvisorie

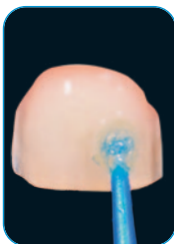

Ena Bond Seal
sulla superficie
del dente

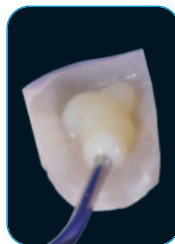

Ena Soft Flow*
in faccette
provvisorie



Faccette provvisorie cementate
con Ena Soft Flow*
Polimerizzazione finale
con Ena Bond Seal



Faccette in ceramica



Risultato finale dopo la cementazione
con composito flow fotopolimerizzabile
(tipo Ena Cem HV)

KIT MOCK UP - PER FACCETTE PROVVISORIE

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	2x50 ml
	Punte automiscelanti	8 pz
	Portaimpronte trasparente x anteriori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x inferiori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x superiori	2 pz
	Enamel plus HRi Flow	3x2 g
	Punte per Flow ø 1,2 mm	3 pz
	Ena Bond Seal	2,5 ml
	Ena Soft Flow	1 g
TS1	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	50 ml
TS1-5	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	5x50 ml
TSPA	Portaimpronte trasparente x anteriori	25 pz
TSPL	Portaimpronte trasparente x inferiori	25 pz
TSPS	Portaimpronte trasparente x superiori	25 pz

