

# TENDER PINK

## MOLTO DI PIÙ PER L'ESTETICA



**Tender Pink** è il sistema più innovativo di compositi per riprodurre il tessuto gengivale sia in studio che in laboratorio. Si compone di quattro siringhe: Pink Dark, Pink Light, Pink Orange, Pink Transparent. L'effetto cromatico aumenta utilizzando i Supercolori Flow Blu, Bianco e Rosso che possono essere anche miscelati tra di loro.

**Supercolori**



**Pink Transparent**



**Pink Light**




**Pink Dark**



**Pink Orange**



## Caratterizzazione gengivale in protesi rimovibile ed implantare

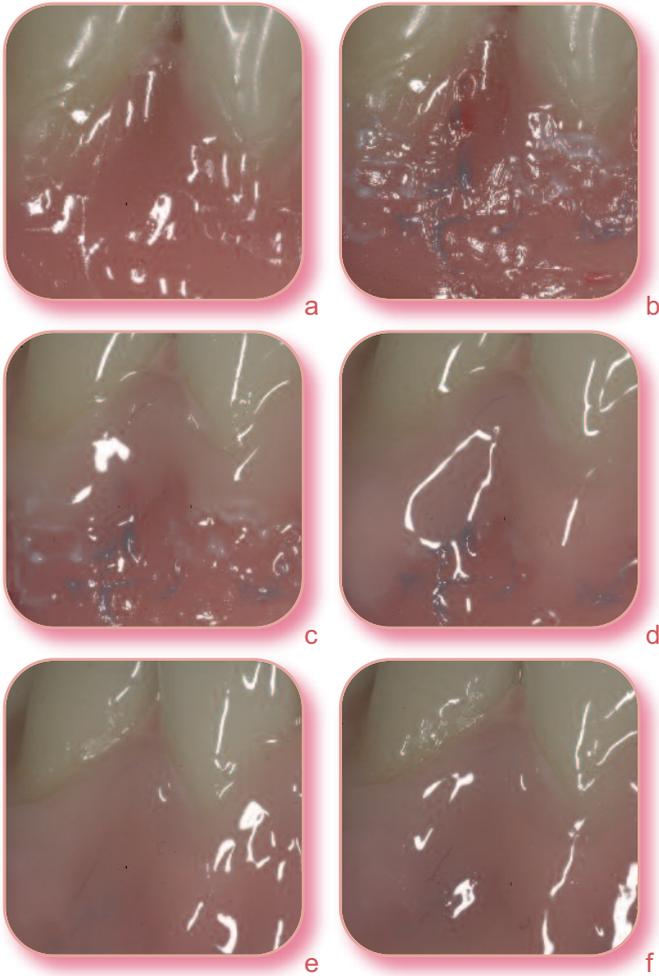

- a. Temp Bonding Fluid consente l'adesione con resina e composito.
- b. Stain Flow **bianco** aumenta l'opacità e la tipica colorazione della **mucosa ischemica**, o le aree delle protuberanze ossee; **rosso** incrementa la cromaticità del composito rosa simulando un effetto di **maggior passaggio sanguigno** e venature più evidenti e **blu** aumenta l'effetto tipico della zona del **fornice** e delle **piccole venature** sanguigne.
- c. Tender Pink **Transparent** riproduce la tipica **area cervicale** dove la mucosa riveste la zona dentale e non ossea.
- d. Tender Pink **Light** riproduce l'area sovra-radicolare dove la mucosa è più tesa e trasparente e riprende la colorazione chiara riflessa dall'**osso sottostante**.
- e. Tender Pink **Dark** riproduce la **zona** della gengiva meno tesa e quindi meno aderente all'osso **irrorata meglio dal sangue** e quindi di colore rosso bluastrò tipico della zona che corrisponde al fornice.
- f. Tender Pink **Orange** (disponibile anche **Flow**) è impiegato in prossimità del bordo o per riprodurre in combinazione con Stain Flow bianco il tipico colore delle **protuberanze ossee della flangia naturale**.

Nuovo Supercolor: **Viola**

Ideale per riprodurre le vene nelle aree della gengiva più profonde. Si può mescolare con Tender Pink **Dark** per aumentarne la cromaticità.

## Tender Pink

### Sistema per caratterizzazione gengivale di protesi

#### Schermatura

**ETOP** Pink Opaque  
Opaco/Adesivo con primer incorporato

#### Colori per caratterizzare la gengiva

**COSSTAIN1N** Supercolori fotopolimerizzabile bianco  
**COSSTAIN3N** Supercolori fotopolimerizzabile blu  
**COSSTAINR** Supercolori fotopolimerizzabile rosso  
**COSSTAINV** Supercolori fotopolimerizzabile viola

#### Composito ad alta resistenza Tender Pink

**ETP** Tender Pink Orange  
**ETPL** Tender Pink Light  
**ETPD** Tender Pink Dark  
**ETPT** Tender Pink Transparent

#### Composito ad alta resistenza Tender Pink Flow

**ETFP** Tender Pink Orange Flow



#### TENDERPKIT Kit Tender Pink

1 Opaco Tender Pink  
 3 Supercolori (blu, rosso, bianco)  
 4 Colori Tender Pink: Orange - Light  
 Dark - Transparent

#### ETPK Kit Tender Pink

1 Opaco Tender Pink  
 4 Colori Tender Pink: Orange  
 Light - Dark - Transparent

#### Adesione resina/composito

**TEMPF** Temp Bonding Fluid

#### Adesione ceramica/composito

**ETBOND** Tender Bonding  
**ETOCLEAR** Tenderpaste opaque clear