

ENNA<sup>®</sup> WHITE 2.0

BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE



# ENA®WHITE 2.0

BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE

IDEATA DAL DOTT. LUIGI LEONARDI

## FASE 1 • STUDIO



## L'INNOVATIVA TECNICA CON SPAZZOLAMENTO CHE ACCELERA LO SBIANCAMENTO

IDEATA DAL DOTT. LUIGI LEONARDI

### PROTOCOLLO OPERATIVO AMBULATORIALE

- Detartrarsi sui denti frontali - linea del sorriso arcata superiore e inferiore - con ablatore.
- Applicazione del bicarbonato con spazzolino Smart Prophy Pink, inumidito, montato su contrangolo (200/250 rpm) per 2/3 min totali al fine di preparare i denti per il gel sbiancante.
- Apposizione del gel Ena®White 2.0, in modo uniforme su tutta la superficie dei denti da trattare: lasciare in posa per 10/15 min.
- Trattamento innovativo dei denti frontali, con gel sbiancante tramite spazzolino Smart Prophy Pink asciutto, montato su contrangolo, (max 300/400 rpm per evitare la dispersione del gel al di fuori del dente) per circa 30/40 secondi su ciascun dente. **Questo procedimento determina una maggior penetrazione del perossido di idrogeno al 6% nel dente aumentando la concentrazione dell'ossigeno attivo con conseguente incremento dell'azione sbiancante**
- Rimozione del gel residuo con getto d'acqua e risciacquo. Verifica dell'effetto sbiancante con il paziente. Carica del gel Ena®White 2.0 dalla siringa al serbatoio dello spazzolino sbiancante e consegna al paziente con la spiegazione delle modalità applicative domiciliari.
- Ricarica dello spazzolino dopo 20 giorni con breve visita ambulatoriale, 5/10 minuti, per ripetere il trattamento domiciliare.

ENA®WHITE 2.0 è un sistema per lo sbiancamento cosmetico che utilizza un gel sbiancante a base di perossido di idrogeno 6% con lo speciale acceleratore XS151™, attivato dallo spazzolamento che incrementa, in modo esponenziale, la velocità di assorbimento del perossido rispetto ad uno sbiancamento tradizionale.



## RIDOTTA TEMPSTICA DI APPLICAZIONE QUOTIDIANA

ENA®WHITE 2.0  
BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE

### FASE 2 • CASA

#### PROCEDIMENTO DI SBIANCAMENTO DOMICILIARE

- Igiene orale al mattino e alla sera. Si consiglia di utilizzare il dentifricio multifunzionale Enamel Plus a bassa abrasività con effetto desensibilizzante e leggermente sbiancante della Linea Ena®oral Care.
- Far fuoriuscire una piccola quantità di gel sullo spazzolino e spazzolare i denti da trattare per 30/45 sec.
- Ripetere lo spazzolamento per altri 30/45 sec. dopo aver inumidito lo spazzolino sotto l'acqua corrente.
- Sciacquare. **Si riduce il rischio di irritazione e sensibilità in quanto diminuisce significativamente il tempo di contatto del dente con il gel sbiancante**
- Consente la continuazione del trattamento sbiancante dopo 20gg effettuando la ricarica dalla stessa siringa durante la visita di controllo. In caso si voglia ottenere un effetto più bianco è possibile prolungare il trattamento acquistando separatamente ulteriori ricariche
- Così procedendo, rispetto alle mascherine, sarà possibile mantenere l'effetto sbiancante praticando il trattamento all'infinito, effettuando ulteriori ricariche con intervalli minimi di 3 mesi durante le visite di controllo, prescrivendo un'applicazione ridotta a ogni 2/3 giorni.

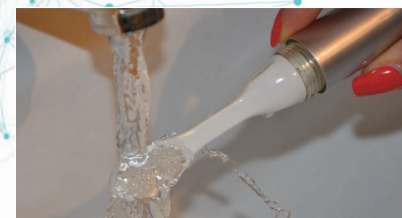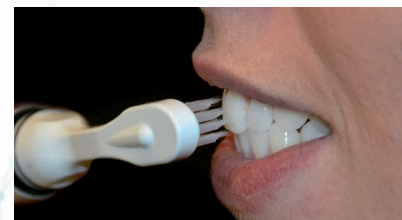

**2 FASI.** 1<sup>a</sup> **Ambulatoriale**, in cui si esegue l'attività di spazzolamento meccanicamente;

2<sup>a</sup> **Domiciliare** con lo speciale spazzolino da denti Ena®White 2.0 con dispenser che viene riempito di gel sbiancante (sufficiente per un trattamento di circa 20 gg. con 2 applicazioni giornaliere).

## VANTAGGI TECNOLOGICI OPERATIVI

- Maggior facilità d'uso grazie allo spazzolino con dispenser
- Maggior comfort per il paziente, due minuti equivalgono ad una notte con convenzionali e fastidiose mascherine sbiancanti. Si evita di ingerire il perossido di idrogeno
- Riduce i rischi di irritazione grazie alla riduzione dei tempi di contatto: 2/3 min al giorno anziché 6/8 ore per ottenere lo stesso risultato sbiancante delle mascherine.
- Un trattamento convenzionale di 20 gg prevede un contatto di c.ca 120/160 ore rispetto a 40/60 min con Ena<sup>®</sup>White 2.0.

CASO CLINICO

Dr. Francesco Simoni



Paziente di 19 anni  
colore rilevato A2 Scala Vita\*



Primo controllo



Secondo controllo



Controllo al termine del trattamento.  
Colore finale ottenuto più chiaro di A1 Scala VITA\*

Vita<sup>®</sup> è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D)