

ENA CEM^{HV}

SISTEMA ESTETICO PER LA CEMENTAZIONE DI FACCETTE



ENA CEM^{HV}

ESTETICA ED AFFIDABILITA'

PER LA CEMENTAZIONE DI FACETTE ESTETICHE
DAL PROVVISORIO ALL'ELEMENTO DEFINITIVO

Ena Cem^{HV} è un composito flow, fotopolimerizzabile, ad alta viscosità, messo a punto dal Dr. Lorenzo Vanini, che valorizza l'estetica delle faccette sia in ceramica che composito. L'alta viscosità e la alta tissotropia garantiscono una perfetta manipolazione per una facile applicazione e rimozione degli eccessi.



CARATTERISTICHE

- > Altamente viscoso (600 Psa)
- > Altamente riempito (80% in peso)
- > Privo di Bis-GMA
- > Fluorescente
- > Radiopaco



VANTAGGI

- > Alte caratteristiche fisiche
- > Facile applicazione
- > Facile rimozione degli eccessi
- > Spessore minimo 26 µm
- > Totalmente biocompatibile
- > Altamente estetico



Composizione:

- Polvere di vetro, Diuretandimetacrilato, Biossido di silicio, Dimetacrilato di tetrametilene
- Contenuto di riempitivo: 80% in peso di cariche inorganiche (0,005 - 40 µm)

CARATTERISTICHE FISICHE

PRODOTTO	SPESSORE/ µm (FORZA 35N)	DUREZZA VICKERS / MPa	MODULO DI YOUNG/ MPa	RESISTENZA ALLA FLESSIONE/ MPa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE/ MPa	RIEMPITIVO (PESO)
Ena Cem ^{HV}	26	941	14.900	154	410	80%
Cemento Flow Duale/Fotopolim.	28/55	270	5471	88	216	63%
Composito alta viscosità	> 500	600/700	8000/11000	140	400	75%

ENA SOFT

PER LA CEMENTAZIONE DI FACCETTE PROVVISORIE



Ena Soft Flow è un composito fotopolimerizzabile fluido, che rimane soffice dopo la polimerizzazione. È utilizzabile per inlay e onlay provvisori ma è specialmente indicato per la cementazione provvisoria delle faccette.

VANTAGGI

- > Ideale per cementazione di faccette provvisorie
- > Semplice da applicare: non si attacca allo strumento
- > Rimane soffice sigillando la faccetta provvisoria
- > Si rimuove senza residui
- > Alte caratteristiche fisiche (resistenza alla flessione 154 MPa)



Caso iniziale: rifacimento di faccette in ceramica per motivi estetici



Rimozione delle faccette presenti e preparazioni per le nuove faccette



Provisori



Applicazione di Ena Bond



Mordenzatura a "Spot"



Applicazione di Ena Seal



Applicazione Ena Soft Flow per la cementazione dei provvisori



Controllo posizionamento dei provvisori



Rimozione dei residui di cemento



Polimerizzazione per 60 secondi



Provisori in situ



1 settimana dopo



Rimozione del provvisorio



Preparazioni dopo la rimozione dei provvisori



Faccette in ceramica feldspatica



CASO CLINICO DEL DR. LORENZO VANINI





Applicazione di Ena Cem Try-in gel nelle faccette in ceramica per prova colore



Prova faccette con Try-in gel




Sabbiatura delle preparazioni



Mordenzatura delle preparazioni con Ena Etch per 20 sec.




Cementazione faccette: fase adesiva con Ena Bond per 40 sec.

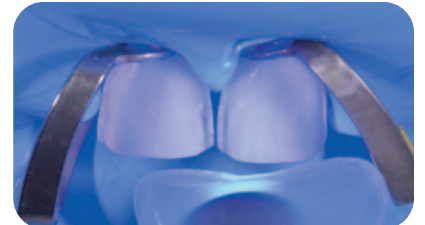

Polimerizzazione Ena Bond per 60 sec.



Ena Seal senza polimerizzare

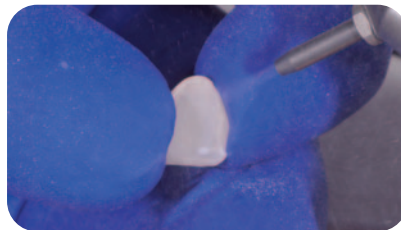

Sabbiatura della faccetta



Mordenzatura della faccetta con acido fluoridrico 9,6%



Applicazione del silano



Applicazione di Ena Seal senza polimerizzare



Applicazione cemento Ena Cem^{HV}



Rimozione degli eccessi



Polimerizzazione per 60 sec. per versante




Rimozione diga e rifinitura



Caso finito

ENA CEM^{HV}

Disponibile nelle seguenti tonalità di dentina fluorescente

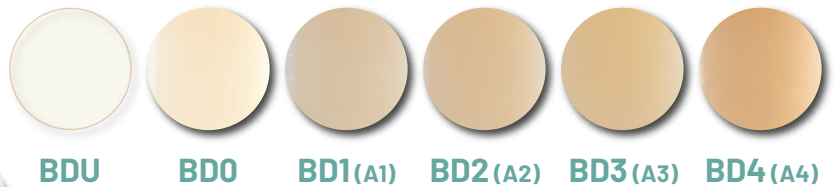

Garantiscono un perfetto adattamento cromatico
e danno luminosità alle faccette di alta estetica
in composito e ceramica

CPCBDK

ENA CEM^{HV}

BD1 (A1*) 2 g

BD2 (A2*) 2 g

BD3 (A3*) 2 g

Ena Soft Flow 1 g

*Vita è un marchio registrato di Vita
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,
Bad Säckingen - D



Ena Cem Try-In Gel disponibile nelle stesse
colorazioni di Ena Cem^{HV} per prova colore

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 870
ordini@micerium.it • www.micerium.it

estetica 
GRUPPO
MICERIUM

File: Ena Cem HV IT v1.2_2025-02