




OBRACE

Istruzioni d'uso
Brackets Ortodontici

Posizionamento dei bkt ortodontici

● Torque ● Tip ● Offset

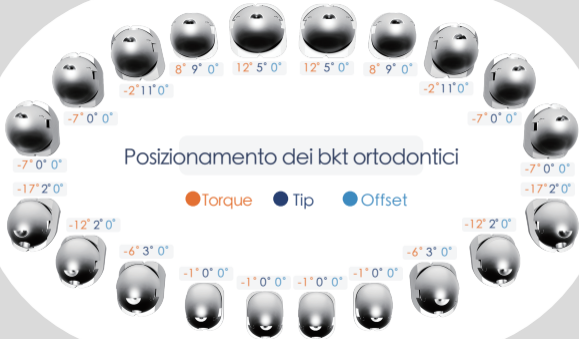

Istruzioni d'Uso Bracket Ortodontico

【 Prodotto 】 Bracket ortodontico.

【 Specifiche 】 Bracket autolegante sferico

【 Destinazione d'uso 】 Per la correzione della malocclusione

【 Proprietà 】 La rugosità della superficie delle legature dei bracket (valore Ra) non è superiore a 1,6µm. La decolorazione e la ruggine non dovrebbero verificarsi sulla superficie del prodotto in condizioni d'uso normali e la forza di adesione del bracket sulla superficie dello smalto è inferiore a 30N. Questo bracket non causa irritazione, ipersensibilità di tipo ritardato e non rilascia citotossicità. Non vi è alcuna azione mutagenica, nessuna tossicità sistemica subacuta e tossicità sistemica acuta nell'elenco Ames. Elementi pericolosi: Cd≤0.02% - Be<0.02% - Pb<0.02% - Ni<15%

【 Struttura del bracket 】 Il bracket è fatto di acciaio inossidabile 17-4 che soddisfa lo standard GB/T 1220:2007 e questo sistema di bracket ortodontico consiste in corpo del bracket, elemento coprente base del bracket e perno O (perno cuboide diritto a molla).

Il bracket autolegante sferico include il gancio e la chiusura

【Indicazioni per l'uso】

1. Disinfezione con soluzione di glutaraldeide prima dell'applicazione clinica: immergere i brackets in soluzione di glutaraldeide per 20 min- 45min seguita da risciacquo con acqua sterilizzata e successivamente strofinare a secco. 2. Il medico specialista deve incollare un bracket in posizione corretta sulla superficie della corona seguendo le istruzioni dell'adesivo per smalto (con adesivo ortodontico qualificato) tenere aperta la parte di copertura fino a quando non è saldamente incollata tra il bracket e il dente, e inserire il filo dell'arco nel foro del bracket, quindi bloccare la parte di copertura.

【Trasporto e conservazione】 Conservare in un ambiente ventilato e non corrosivo, con umidità relativa inferiore all'80%; non premere durante il trasporto.

【Controindicazione】 Persone che potrebbero non essere adatte al trattamento ortodontico includono: Pazienti con pulposi e parodontosi; Pazienti con diabete, cardiopatie coronariche, malattie cardiache reumatiche o altre malattie cardiache; Donna in gravidanza o allattamento.

【Precauzioni】 1. prodotto monouso che non può essere riciclato e riutilizzato. **②**

2. Non usare se il pacchetto è rotto. 3. Questo prodotto è destinato all'applicazione clinica da parte di ortodontisti professionali. 4. Il paziente deve essere informato da parte del clinico che si potrebbero manifestare reazioni allergiche e se dovesse accadere si dovrà richiedere l'intervento di un medico. 5. Il centro del bracket deve essere posizionato al centro della corona clinica e il suo asse orizzontale deve coincidere con il centro della corona clinica durante l'incollaggio.

6. Il medico dovrebbe avvertire il paziente di non assumere cibi duri o appiccicosi dopo l'incollaggio (come ossa, mais, torta di mele e riso).

7. Se durante il trattamento si verificasse un fallimento, il medico dovrebbe selezionare lo stesso tipo di bracket della stessa azienda. Ogni bracket dovrebbe essere usato sul dente corrispondente. In caso contrario, l'effetto previsto non può essere raggiunto o addirittura causare disturbi occlusali. 8. Dopo l'uso il bracket deve essere considerato come rifiuto solido medico.

9. Consultare un medico se si verificano altre situazioni.

【Gestione post-vendita】 Se si verificano problemi di qualità che portano a malformazioni con 1 anno di ritardo rispetto alla data di produzione, il distributore fornirà gratuitamente il servizio di sostituzione del prodotto. Per maggiori dettagli vedere i termini di post-vendita.

【MFD/EXP】 Vedi Certificato Qualificato

【Lot Number】

Produttore: GUANGZHOU OO MEDICAL SCIENTIFIC LIMITED

Indirizzo della fabbrica: Room 316, Building G2, South China Advanced Materials Innovation Park, No.31, Kefeng Road, Guangzhou Development District, Guangzhou, Guangdong, 510670, CHINA

Tel: +86-20-37879606 E-mail: info@oodental.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

0049-40 2513175 shholding@hotmail.com.