



Ena® White 2.0

L'innovativa tecnica con spazzolamento che accelera lo sbiancamento

Lo sbiancamento domiciliare professionale più rapido con pretrattamento in studio. E' un sistema per lo sbiancamento professionale cosmetico domiciliare che consiste in uno speciale spazzolino da denti con dispenser contenente il gel sbiancante a base di perossido di idrogeno 6% con lo speciale acceleratore XS151™, che viene attivato con lo spazzolamento: si incrementa in modo esponenziale la velocità di assorbimento del perossido rispetto ad uno sbiancamento tradizionale con mascherina.

Vantaggi operativi e tecnologici

- Maggior facilità d'uso grazie allo spazzolino con dispenser
- Maggior comfort per il paziente, due minuti equivalgono ad una notte con convenzionali e fastidiose mascherine sbiancanti. Si evita di ingerire il perossido di idrogeno.
- Riduce i rischi di irritazione grazie alla riduzione dei tempi di contatto: 2/3 min al giorno anziché 6/8 ore per ottenere lo stesso risultato sbiancante delle mascherine.
- Un trattamento convenzionale di 20 gg prevede un contatto di c.ca 120/160 ore rispetto a 40/60 min con Ena®White 2.0.

Precaricato

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	ECW01*	ENA WHITE 2.0 PROFESSIONAL HOME BLEACHING SYSTEM Spazzolino precaricato con gel H ₂ O ₂ 6 ml	1 pz
	ECW01B*	ENA WHITE 2.0 PROFESSIONAL HOME BLEACHING SYSTEM Spazzolino precaricato con gel H ₂ O ₂ 6 ml Dentifricio Enamel Plus 75 ml	1 pz 1 pz
	ECW02	ENA WHITE 2.0 PROFESSIONAL HOME BLEACHING SYSTEM Spazzolino precaricato con gel H ₂ O ₂ 6 ml	2 pz

**ordine minimo: multipli di 24 pezzi confezionati in dispenser di 12 tubi
N.B. Spazzolini da denti consegnati in una scatola separata per facilitare lo stoccaggio in frigorifero*



Fase 1 • STUDIO

Ambulatoriale, attività di spazzolamento meccanico



Protocollo operativo:

- Detartrasi
- Applicazione del bicarbonato con spazzolino Smart Prophy Pink, inumidito, montato su contrangolo (200/250 rpm)
- Apposizione del gel Ena® White 2.0: lasciare in posa per 10/15 min.
- Applicare il gel sbiancante tramite spazzolino Smart Prophy Pink asciutto, montato su contrangolo (max 300/400 rpm) per circa 30/40 secondi su ciascun dente e risciacquare.
- Carica del gel Ena® White 2.0 dalla siringa al serbatoio dello spazzolino sbiancante
- Ricarica dello spazzolino dopo 20 giorni



Fase 2 • CASA

Domiciliare, procedimento di sbiancamento



- Igiene orale
- Far fuoriuscire una piccola quantità di gel sullo spazzolino e spazzolare i denti da trattare per 30/45 sec.
- Ripetere lo spazzolamento un'altra volta dopo aver inumidito lo spazzolino sotto l'acqua corrente.
- Consente la continuazione del trattamento sbiancante dopo 20 gg effettuando la ricarica dalla stessa siringa durante la visita di controllo.
- Sono possibili ulteriori trattamenti sbiancanti con ulteriori ricariche con intervalli minimi di 3 mesi.

Da caricare

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	ECW01BS	ENA WHITE 2.0 PROFESSIONAL HOME BLEACHING SYSTEM	
		Spazzolino con serbatoio (vuoto)	1 pz
		Ricarica gel sbiancante H ₂ O ₂	11 ml
		Dentifricio Enamel Plus 75 ml	1 pz
	ECW6ES	ENA WHITE 2.0 PROFESSIONAL HOME BLEACHING SYSTEM PER UN TRATTAMENTO DI 40 GIORNI	
		Spazzolino con serbatoio (vuoto)	6 pz
		Ricarica gel sbiancante H ₂ O ₂	6 pz x 11 ml

Altre confezioni disponibili su richiesta