


Shiny

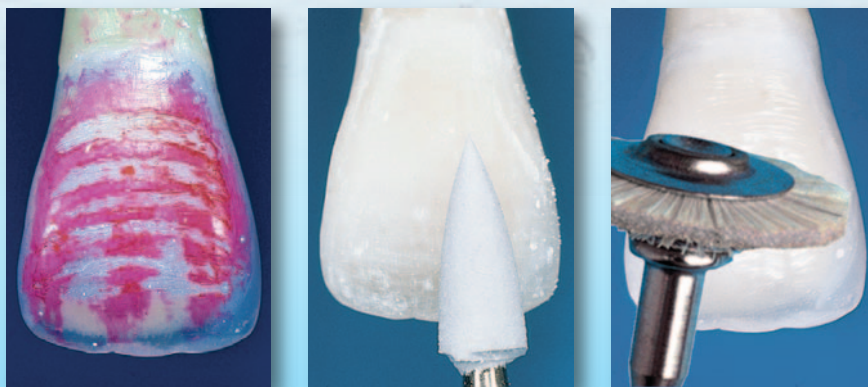

Correzione della geografia di superficie e lucidatura

Step by step del sistema di lucidatura: gommino Shiny14, pasta diamantata Shiny A 3 μ e Shiny B 1 μ con spazzolino.

Per rifinitura e lucidatura di ricostruzioni estetiche dirette in studio, di faccette, intarsi e corone in laboratorio, eseguite in composito.


IL SISTEMA COMPRENDE

- Paste diamantate: SHINY A 3 μ , SHINY B 1 μ
- Pasta all'ossido di alluminio SHINY C
- Air Block SHINY G
- Spazzolini e feltrini SHINY S, SHINY F
- Gommini pre-lucidanti SHINY14 e SHINY33
- Accessori per rifinitura

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

	Durezza Vickers	Deviaz.
Enamel plus HRi microibrido	55	1,2
HRi microibrido (a.b.+p.d.)	+10%	0,8
Microriempito	18-30	4

Trattamento di superficie: durezza Vickers e sua deviazione dai valori medi (a.b.=Air Block • p.d.= Pasta Diamantata).

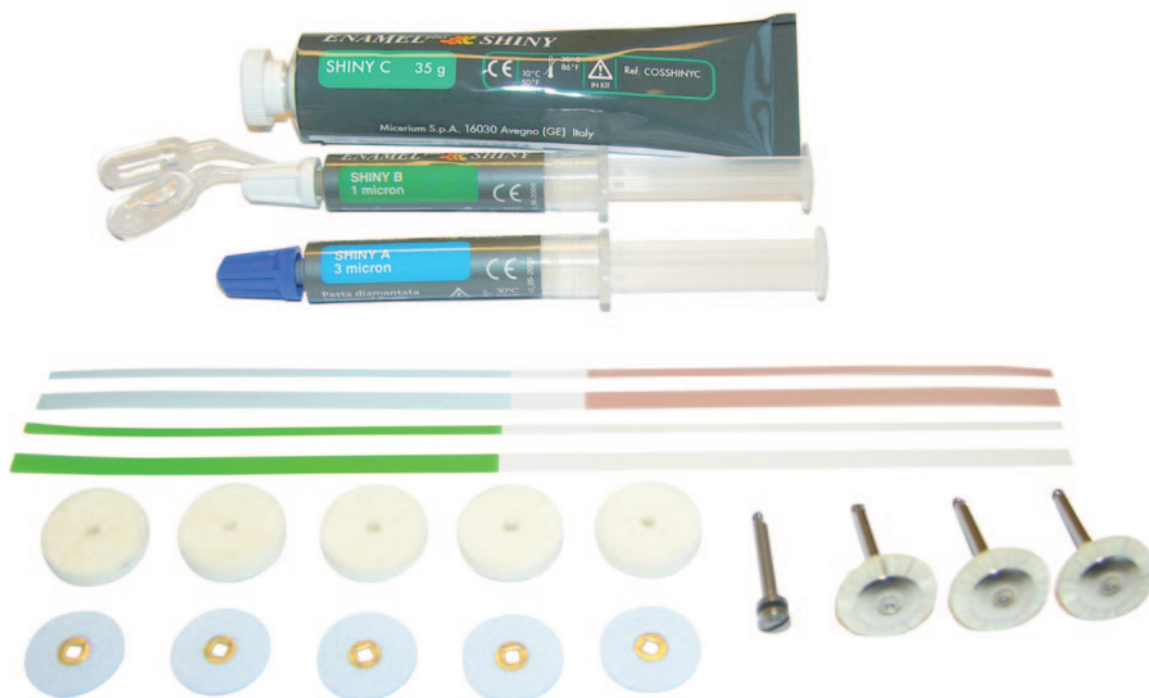

ENAMEL PLUS SHINY KIT




Pasta Shiny C ossido di alluminio con feltrino; restauro ultimato sotto luce diretta (sinistra) e polarizzata (destra).



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYKIT	FINISHING KIT SHINY	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Air Block SHINY G	7 tips
	Frese Shiny	4 pz
	Spazzolini di capra RA Shiny S/SS	3 pz
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	3 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	16 pz
	Dischi SHINY D...	12 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	5 pz
	Feltrino a ruota SHINY F/SF	5 pz
	Gommino SHINY 14	2 pz
	Mandrino RA	2 pz
	Pennelli monouso	10 pz
	Manico per pennelli	1 pz



COSSHINY+G	KIT SHINY PASTE PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S/SS	3 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	3 pz
	Feltrino a ruota SHINY F/SF	3 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	2 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	4 pz

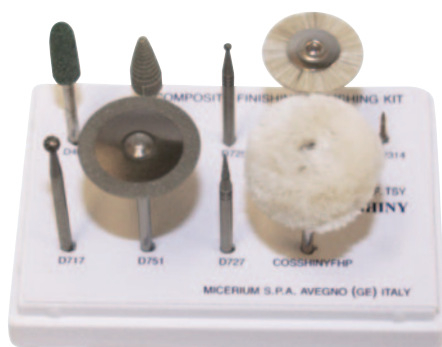

COSSHINY-Y+G	MINI KIT SHINY PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	0,5 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	0,5 g
	Pasta brillantante SHINY C	4 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S	2 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Feltrino a ruota SHINY F	2 pz
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	1 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	2 pz
	Strisce di carta SHINY M...	2 pz

TSY	KIT RIFINITURA SHINY PER LABORATORIO	
	Pasta SHINY A	0,5 g
	Pasta SHINY B	0,5 g
	Pasta SHINY C	4 g
	Tip Glicerina	1 pz
	Cono di carta con mandrino	1 pz
	Spazzolino di capra Shiny S-HP	1 pz
	Feltrino Shiny F-HP	1 pz
	Fresa Carbide FG	1 pz
	Punta Montata verde HP	1 pz
	Diamantata HP (D717-D725-D727)	3 pz
	Disco diamantato 2 lati 0,15mm D751	1 pz

ENAMEL PLUS SHINY RICAMBI

Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYG7	SHINY G glicerina Air Block in tips da 0,5 ml	7 pz
COSSHINYG	SHINY G glicerina Air Block in siringa	2 ml
COSSHINYG10	SHINY G glicerina Air Block in siringa	10 ml
COSSHINYA	SHINY A 3 micron Pasta diamantata per prelucidare il composito da applicare con Shiny S	2 g
COSSHINYB	SHINY B 1 micron Pasta diamantata per lucidare il composito da applicare con Shiny S	2 g
COSSHINYC	SHINY C ossido di alluminio Pasta per brillantare il composito da applicare con Shiny F	35 g
COSSHINYS	SHINY S spazzolino di capra a ruota RA	12 pz
COSSHINYSHP	SHINY S spazzolino di capra a ruota HP	12 pz
CSS	SHINY SS spazzolino di capra a ruota RA mini per posteriori	12 pz
COSSHINYF	SHINY F feltrino a ruota spessore 2 mm da utilizzare con COSSHINY6	30 pz
COSSHINYFD	SHINY FD feltrino a disco interprossimale 0,5 mm	100 pz
CSF	SHINY SF feltrino in cotone RA (17x10 mm)	12 pz
COSSHINYFHP	SHINY FHP feltrino in cotone HP	12 pz
COSSHINY13	SHINY gommini pomice prelucidatura	12 pz
COSSHINY33	SHINY gommini marroni	12 pz
CS014	SHINY14 Gommini diamantati per prelucidare composito	6 pz
COSSHINY15	SHINY15 Gommini diamantati grigi one step per lucidare composito	3 pz
CS041	SHINY41 Spazzolini impregnati per posteriori a punta	6 pz
CS042	SHINY42 Spazzolini impregnati per posteriori a mini coppetta	6 pz
CS043	SHINY43 Spazzolini impregnati per posteriori a coppetta media	6 pz



ENAMEL PLUS SHINY RICAMBI



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYCON	Conetti di carta per HP	25 pz
COSSHINYCONM	Mandrino per conetti di carta Shiny	1 pz
COSSHINY6	SHINY Mandrino per feltrini a ruota	6 pz
COSSHINYFM	SHINY Mandrino per dischi	1 pz
COSSHINYDF	SHINY DISCS grana finissima marrone	100 pz
COSSHINYDX	SHINY DISCS grana fine blu	100 pz
COSSHINYDM	SHINY DISCS grana media verde	100 pz
COSSHINYDC	SHINY DISCS grana grossa avorio	100 pz
COSSHINYSF	SHINY STRIPS grana fine (blu) finissima (marrone)	100 pz
COSSHINYSFS	SHINY STRIPS grana fine-finissima sottile	100 pz
COSSHINYSM	SHINY STRIPS grana media (verde) grossa (avorio)	100 pz
COSSHINYSMS	SHINY STRIPS grana media-grossa sottile	100 pz
COSSHINY1	Manico per pennelli	1 pz
COSSHINY50	Pennelli di ricambio	50 pz
COSSHINY25	Punte ø 0,9 mm per Glicerina e Flow	25 pz
CS050-2R	Strisce diamantate 120 mm x 2 mm grana fine rossa	5 pz
CS050-2Y	Strisce diamantate 120 mm x 2 mm grana extra-fine gialla	5 pz
CS050-4R	Strisce diamantate 120 mm x 4 mm grana fine rossa	5 pz
CS050-4Y	Strisce diamantate 120 mm x 4 mm grana extra-fine gialla	5 pz

