

SAFE MATRIX

(front part)

Matrice circolare monouso

maggior visibilità e accesso significano migliori risultati

(white side)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Perno per regolazione conicità per una maggior aderenza attorno al dente
- Collo leggero e sottile per maggior visibilità e accesso
- I bordi lisci assicurano il comfort del paziente
- Il meccanismo di tensionamento morbido e preciso aiuta a raggiungere l'adattamento richiesto

(back side)

ISTRUZIONI D'USO

- prima dell'uso, per regolare la fascia e adattarla al quadrante della bocca in cui verrà utilizzata la banda SafeMatrix. spingere il perno sul lato in cui si vuole restringere la banda: questo lato deve essere posizionato verso la gengiva.
- Inserire la banda della matrice intorno al dente e stringere girando la vite in senso orario. Non stringere troppo. Per i denti più grandi, svitare la fascia in senso antiorario
- Applicare i cunei e modellare la matrice utilizzando un utensile di brunitura adatto, se necessario
- Per rimuovere la matrice, allentare ruotando la vite a testa zigrinata di 2-3 giri in senso antiorario

Disponibile anche: Safe Matrix Contour

(Blue side)

Queste matrici preassemblate, facili da usare, accelerano il processo di restauro, facendo risparmiare tempo prezioso alla poltrona e migliorando i risultati

DESCRIZIONE

- il collo affusolato permette un posizionamento più facile e una maggior visibilità
- nessun rischio di lesioni quando si posizionano le matrici

- nessuna possibilità di intrappolare il labbro del paziente durante il serraggio della matrice
- fornisce punti di contatto eccellenti, anche per i restauri in composito
- adatto per l'uso con tutti i materiali di restauro

SAFE MATRIX CONTOUR

(front part)

Matrice circolare anatomica monouso

Maggiore visibilità e accesso significano migliori risultati

(white side)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Perno per regolazione conicità per una maggiore aderenza attorno al dente
- Collo leggero e sottile per migliore visibilità e accesso
- I bordi lisci assicurano il comfort del paziente
- Il meccanismo di tensionamento morbido e preciso aiuta a raggiungere l'adattamento richiesto
- Le matrici pre-sagomate CONTOUR permettono un contatto interprossimale ancora più stretto conformandosi alla forma del dente

(back side)

ISTRUZIONI D'USO

- prima dell'uso, per regolare la fascia e adattarla al quadrante della bocca in cui verrà utilizzata la banda SafeMatrix. spingere il perno sul lato in cui si vuole restringere la banda: questo lato deve essere posizionato verso la gengiva.
- Inserire la banda della matrice intorno al dente e stringere girando la vite in senso orario. Non stringere troppo. Per i denti più grandi, svitare la fascia in senso antiorario
- Applicare i cunei e modellare la matrice utilizzando un utensile di brunitura adatto, se necessario
- Per rimuovere la matrice, allentare ruotando la vite a testa zigrinata di 2-3 giri in senso antiorario

Disponibile anche: Safe Matrix Standard

(orange side)

Le matrici pre-sagomate CONTOUR facilitano il ripristino dei contorni anatomici interprossimali dei denti, aiutano a mantenere la banda in posizione sulla leggera curvatura dei denti posteriori e creano una superficie liscia sulla quale il materiale da restauro può essere lavorato, riducendo il rischio di scarificazioni

DESCRIZIONE

- il collo affusolato permette un posizionamento più facile e una migliore visibilità
- nessun rischio di lesioni quando si posizionano le matrici
- nessuna possibilità di intrappolare il labbro del paziente durante il serraggio della matrice
- fornisce punti di contatto eccellenti, anche per i restauri in composito
- adatto per l'uso con tutti i materiali di restauro