
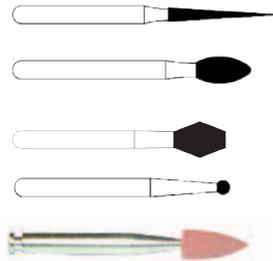


## CS2LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA E LUCIDATURA PER POSTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI E INDIRECTI

### PREPARAZIONE

- Tronco coniche arrotondate in punta grana media 849-524-012, 849-524-016 (per denti corti) 855-524-014, 856-534-016 (per denti lunghi) per preparazione da piccole cavità a sempre più grandi
- Tronco coniche arrotondate in punta grana fine anello rosso 849-514-012, 849-514-016 (per denti corti) 855-514-014, 856-504-018 (per denti lunghi) per rifinire preparazioni
- Frese 859 per ritocchi interprossimali preparazione (534-012) e rifinitura (504-014)
- Frese 368 per ritocchi occlusali preparazione (524-025) e rifinitura (514-025)
- Frese 811 per riduzioni occlusali preparazione (534-040) e rifinitura (504-040)
- Palline al tungsteno 014 e 018 per rimozione dentina patologica
- Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

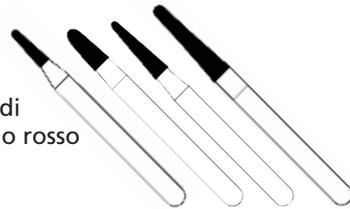

### RIFINITURA COMPOSITO

- Punta "Coda di topo" 853-514-008 per rifinitura iterprossimale occlusale
- Punta 390-504-016 per rifinitura occlusale



### LUCIDATURA

- Gommino grigio SHINY15 per pre-lucidatura
- Spazzolino SHINYS, prima con pasta diamantata 3 μm Shiny A, poi con pasta diamantata 1 μm Shiny B, per lucidatura
- Feltrino SHINYF con ossido di alluminio Shiny C per brillantatura



## CS1LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA E LUCIDATURA PER ANTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI

### PREPARAZIONE

- Palline 801-524 (012 per smalto sottile - 014 per smalto spesso) per preparazione chamfer vestibolare
- Palline 801-514 anello rosso (012 per smalto sottile - 014 per smalto spesso) per rifinire preparazione chamfer vestibolare
- Frese taglienti solo in punta: 839-524 (012 per smalto sottile - 014 per smalto spesso) per preparazione 90° Butt margin interprossimale e linguale-palatino
- Frese taglienti solo in punta: 839-514 anello rosso (012 smalto sottile - 014 spesso) per rifinire preparazione 90° Butt margin interprossimale e linguale-palatino
- Palline al tungsteno 014 e 018 per rimozione dentina patologica
- Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione



### RIFINITURA COMPOSITO

- Fiamma 861-524-012 per grossi ritocchi
- Fiamma 861-514-012 anello rosso per ritocchi vestibolari
- Oliva 368-524-025 per grossi ritocchi
- Oliva 368-514-025 anello rosso per ritocchi palatali
- Punta "Coda di topo" 853-514-008 anello rosso per ritocchi linguali e incisali
- Punta montata verde o fresa multilama (9904) per ritocchi fini





### TRATTAMENTO SUPERFICIE E LUCIDATURA

- Punta "Coda di topo" 853-514-008 anello rosso per macro geografia (verticale)
- Gommino bianco SHINY14 per pre-lucidatura
- Punta montata verde (carborundum) per micro geografia (orizzontale)
- Spazzolino SHINYS, prima con pasta diamantata 3 μm Shiny A, poi con pasta diamantata 1 μm Shiny B, per lucidatura
- Feltrino SHINYF con ossido di alluminio Shiny C per brillantatura

## CS3LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA PER FACCETTE E CORONE METAL FREE IN COMPOSITO E CERAMICA



### PREPARAZIONE CORONE

- Frese grana media 847R-524-016 (per denti corti), 850-524-016 (per denti lunghi) per preparazione monconi (847R-514-016, 850-514-016 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)
- Fresa grana media 368-524-025 per preparazione parete palatina (368-514-025 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)
- Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

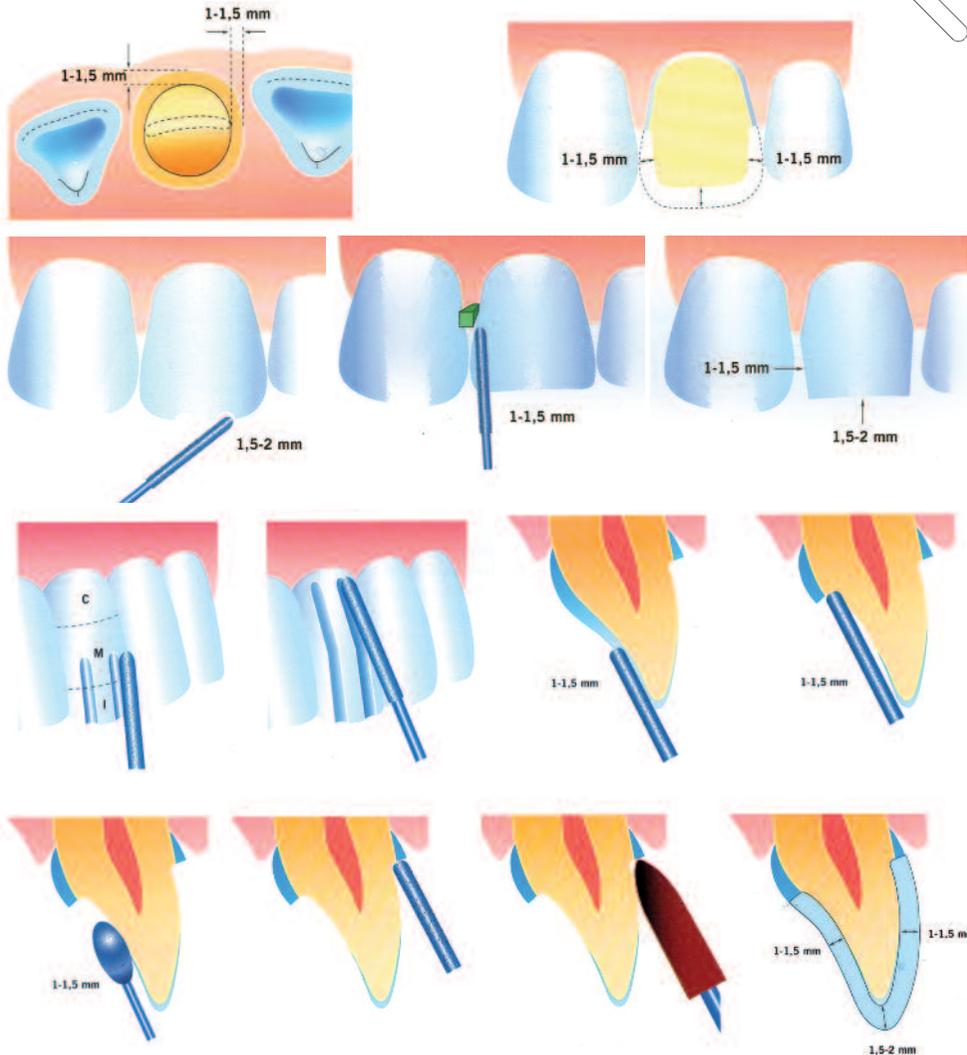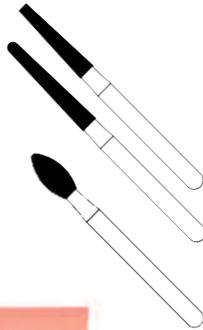

### PREPARAZIONE FACCETTE

- Palline grana media 801-524 (012 per smalto sottile 016 per smalto spesso) per preparazione del chamfer nelle zone aprossimali delle faccette (801-514 -012 per smalto sottile -016 per smalto spesso, grana fine anello rosso per rifinitura preparazione chamfer)
- Frese grana media 847R-524-016 e 848-524-012 per formazione dei solchi guida vestibolari seguendo l'inclinazione del profilo di emergenza, cervicale, medio e incisale (847R-514-016 e 848-514-012 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)
- Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

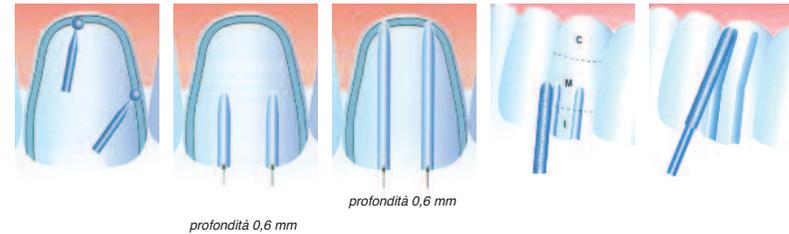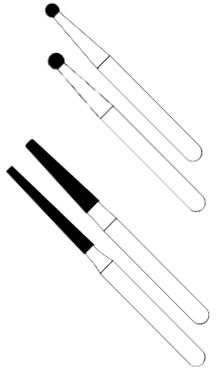

## CS4LV KIT PREPARAZIONE E RIFINITURA PER CORONE IN METALLO 50° E 90°

### PREPARAZIONE

- Frese grana media 878-524-012, 878-524-016 (per denti corti), 879-524-012, 879-524-016 (per denti lunghi) per preparazione corone metallo ceramiche 50° (878-514-012/016 879-514-012/016 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)
- Frese grana media 850-524-018, 847-524-016, 848-524-018 per preparazione corone 90° (850-514-018, 847-514-016, 848-514-018 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)
- Frese 811 per riduzioni occlusali preparazione (524-037) e rifinitura (514-037)
- Frese taglienti solo in punta grana media 839-524-016 per preparazione 90° Butt margin interprossimale e linguale-palatino (839-514-016 grana fine anello rosso per rifinire preparazione)
- Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

