

SafeMatrix™

MATRICI CIRCOLARI SEMPLICI FLESSIBILI & PRECISE



UTILIZZABILI
AD OCCHI CHIUSI






Lavorazione ad occhi chiusi semplice e veloce

3 STEPS per un filling perfetto

1.

Preparare la banda SafeMatrix spingendo il perno sul lato in cui si vuole restringere la banda fino a quando il perno è a filo con il supporto. Questo lato deve essere posizionato verso la gengiva. La banda si adatta conicamente all'anatomia del dente.

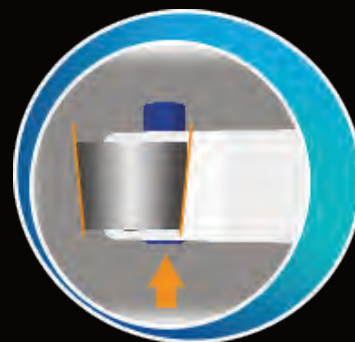


2.

Posizionare la banda della matrice intorno al dente e guidarla attentamente in posizione. Stringere la banda girando la vite in senso orario. La banda può essere brunita se necessario. Utilizzare cunei se necessario.



3.

Crea la tua otturazione restaurativa e curala come al solito. Rimuovi la matrice girando la vite in senso antiorario per allentarla e il gioco è fatto!

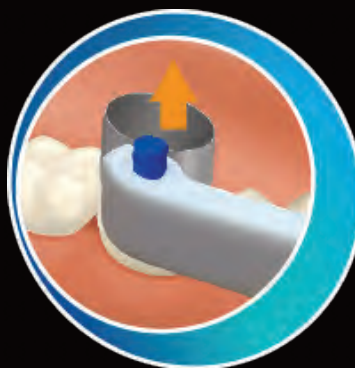


SafeMatrix™

SafeMatrix™



SafeMatrix™ Contour

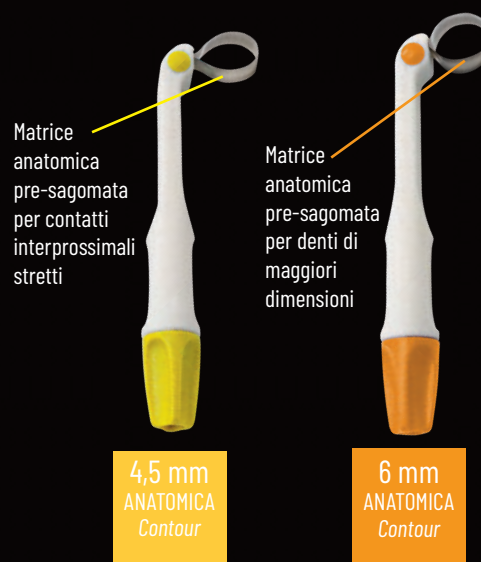

La matrice "Contour" è preformata per conformarsi alla forma del dente.

CARATTERISTICHE

Applicazione universale

SafeMatrix è adatto per tutte le cavità MO/OD e MOD, così come per le ricostruzioni delle cuspidi come schermo protettivo per il dente vicino durante la preparazione.

Compatibilità

Può essere utilizzato con tutti i materiali da restauro e con cunei e dighe di gomma.

Adattamento ottimale

Il meccanismo di tensionamento e l'adattamento conico al dente assicurano uno stretto contatto interprossimale.

Design facile da usare

Il collo stretto e i bordi arrotondati garantiscono un accesso sicuro e facile durante il trattamento.

Igienico

Ogni matrice è confezionata singolarmente essendo un prodotto monouso.

Risparmio di tempo

Non c'è bisogno di un lungo assemblaggio di banda e supporto.

Delicato

Elimina il rischio di lesioni alla gengiva e alle guance spesso causate da bordi affilati o superfici corrosive sui supporti metallici.

SafeMatrix™

Produttore



SAFE MATRIX

SafeMatrix™

E19000

Matrici circolari SafeMatrix monouso
Narrow verde 4,5 mm per premolari e decidui

50 pz

E19005

Matrici circolari SafeMatrix monouso
Wide blu 6 mm per molari

50 pz



SAFE MATRIX CONTOUR

SafeMatrix™ Contour

E19001

Matrici circolari SafeMatrix monouso
Anatomiche Contour
Narrow giallo 4,5 mm per premolari e decidui

50 pz

E19006

Matrici circolari SafeMatrix monouso
Anatomiche Contour
Wide arancio 6 mm per molari

50 pz

Distributore Europeo

LOSER & CO

after mal was Gutes...



Distributore esclusivo in Italia

Micerium S.p.A.

Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy

Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970

ordini@micerium.it • www.micerium.it

