

ENAMEL PLUS
HRi FLOW^{HF}

PROVVISORI IN 5 MINUTI!

Temp Silic Mock up è un prezioso strumento di comunicazione tra dentista, paziente e laboratorio odontotecnico che permette di realizzare provvisori diretti alla poltrona utilizzando il composito fluido altamente riempito Enamel Plus HRi Flow, materiale estetico dalle caratteristiche fisiche ideali.

VANTAGGI TECNOLOGICI & OPERATIVI

- impronta con silicone e tray trasparenti 45 sec.
- indurimento impronta 1 min. 30 sec.
- preparazione faccette
- applicazione Flow HRi in mascherina 30 sec.
- fotopolimerizzazione 60 sec.
- polimerizzazione finale con enaseal 60 sec.

ENAMEL PLUS HRi FLOW^{HF}

- Altamente riempito
- Altamente fluorescente
- Maggiore viscosità
- Maggiore elasticità
- Maggiore radiopacità
- Migliori proprietà fisiche
- Senza bolle



Caso iniziale



Risultato finale




CARATTERISTICHE FISICHE

	RIEMPITIVO %	DUREZZA VICKERS MPa	YOUNG MODULUS MPa	RESISTENZA FLESSIONE MPa	RESISTENZA COMPRESIONE MPa	RADIOPACITÀ
HRi Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al



Ceratura

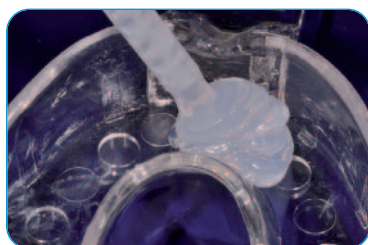

Silicone e tray trasparente



Impronta (indurimento 1 min. 30 sec)



Flow HRi* Polimerizzazione (60 sec)



Provvisori



Preparazione sui provvisori



Preparazioni



Applicazione del Flow HRi*



Cementazione dei provvisori



Faccette



Risultato finale

KIT MOCK UP - PER FACETTE PROVVISORIE

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic Silicone trasparente per dentista	2x50 ml
	Punte automiscelanti	8 pz
	Portaimpronte trasparente x anteriori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x inferiori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x superiori	2 pz
	Enamel plus HRi Flow	3x2 g
	Punte per Flow ø 1,2 mm	3
	Ena Seal	2,5 ml
TS1	Silicone trasparente per dentista	50 ml
TS1-5	Silicone trasparente per dentista	5x50 ml
TSPA	Portaimpronte trasparente x anteriori	25 pz
TSPL	Portaimpronte trasparente x inferiori	25 pz
TSPS	Portaimpronte trasparente x superiori	25 pz



Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 880 • Fax 0185 7887 970 • micerium@micerium.it • www.micerium.it

CE 0123

*Per Enamel Plus HRi Flow vedere le istruzioni del fabbricante GDF incluse nel Kit.

