

ENAMEL PLUS TEMP



PROVVISORI ESTETICI IN RESINA



ENAMEL  TEMP
plus

LAVORAZIONE MANUALE >>

CERATURA



Cera

COLATA DENTINA

2


6 dentine* universali
UD0, UD1 (A1), UD2 (A2),
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5),
UD4 (A4)

*disponibili su richiesta anche i colori:
B1, B2, B3, B4, C2, D3

TECNICA CON MASCHERINA


Liquido a freddo ref. TEMPL

Liquido a caldo ref. TEMPLH

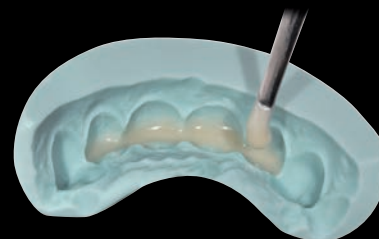

TAGLI SMALTO

3

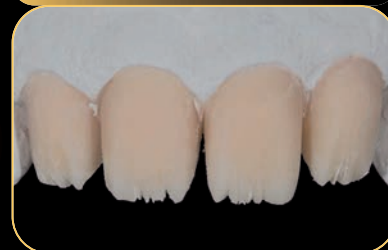

Documentazione iconografica
Odt. Roberto Rossi - Lab. Rondoni

OPALESCENZE E CARATTERIZZAZIONI


4



3 smalti opalescenti Clear, Gray, Blue
1 smalto intensivo White
Liquido fotopolimerizzabile TEMPLC

5


COLATA SMALTO

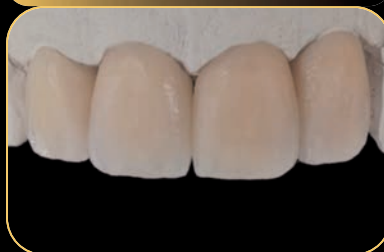

3 smalti universali
UE1 (dente anziano)
UE2 (dente adulto)
UE3 (dente giovane)
Liquido a freddo e a caldo

LUCIDATURA

6

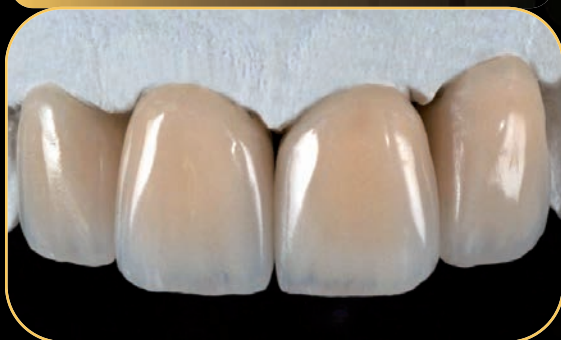

Stick TEMP99
Spazzolino COSSHINYSHIP

DATI FISICI ELEVATI

Lavorazione manuale

Solubilità all'acqua:
1,1 µg/mm³
Assorbimento acqua:
21.2 µg/mm³
Durezza Vickers:
140 MPa
Elasticità:
2300 MPa
Residuo monomero:
0.8 %
Resistenza flessione:
60-75 MPa

ENAMEL  TEMP
plus

Biocompatibile*
Atossica*
Anallergica*
Antiplacca*
Fluorescente



Questo materiale è molto interessante per l'opacità delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse Smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica.

PROVVISORIO
CON PAPILLA



Resina Rosa Temp Pink TEMPP
Indicata per lavori di protesi rimovibili e su impianti

*test di citotossicità con contatto diretto delle cellule ASTM F 813-83 e a diffusione Agar a ASTM F895-84 con estratto dai provini. Test di irritazione e sensibilizzazione allergica secondo Buehler, OECD 406-92 e DIR CEE 93/21

ENAMEL TEMP plus

KIT INTRODUTTIVO



TEMP1N KIT INTRODUTTIVO RESINA PER PROVVISORI CONTENENTE:

4x50g nuove dentine fluorescenti Enamel plus Temp:

UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

1x50g smalto fluorescente Enamel plus Temp UE2

1x50g smalto opalescente Enamel plus Temp Blue OB

100ml liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp

TEMP1N-OF KIT INTRODUTTIVO OFFERTA:

1 Kit Introduttivo TEMP1N

+ 6x10g altri colori fluorescenti Enamel plus Temp

Dentine: UD1 (A1)

Smalti: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey

TEMP99 Pasta lucidante Temp Stick Micerium

Spazzolino HP

LIQUIDI



TEMPL

liquido a freddo 100ml, tecnica con mascherina

TEMP1-L

liquido a freddo 1000ml, tecnica con mascherina

TEMP1H

liquido a caldo 100ml, tecnica con mascherina

TEMP1C

liquido fotopolimerizzabile 10ml, opalescenze e caratterizzazioni

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 870 • www.micerium.it
File: TEMP ITA v5_2026-05

